

## -Zusatzblatt-

Für Bereiche mit sehr starken Magnetfeldern

MRT (Kernspintomograph)

Warnzeichen



Nach Betätigung des elektrischen Ausschalter bleibt das Magnetfeld weiterhin bestehen. Gefahr das metallische Gegenstände auch aus weiter Entfernung angezogen werden (Atemschutzflaschen, Gasflaschen)!

Warnhinweise bestehen weiterhin.

Bei Notfällen, Patient klemmt im Tunnel fest und ist in Lebensgefahr, mit roten Quench Knopf abschalten „drücken“ dabei entweicht schlagartig das flüssige Helium (Füllstand bis 1600 L) als Gas sehr laut mit weißer Wolke und verflüchtigt sich in die freie Atmosphäre.

Die Anwender sind über die Funktion des Quench Knopfes informiert. Bei „Quench“ entstehen Kosten für Helium von ca. 15.000,- EUR und eine Woche Ausfall des Gerätes

MRT= Magnet-Resonanz-Tomograph